

动态血压监测仪 快速使用指南



按键功能

- 开 机：关机情况下，点击按钮，机器开机，屏幕当前系统时间与电池电量；
- 关 机：开机情况下，长按按钮5秒钟，机器会发出连续的“哔哔”声，设备关机；
- 启动单次测量：在开机状态下，点击按钮，血压监测仪启动单次手工测量；
- 停止单次测量：在测量状态下，点击按钮，血压监测仪停止测量；
- 阅读功能按键：点击按钮，可向前或向后查看历史血压测量数据；

OLED显示内容



MEM	闪烁表示血压数据满，需检索上传重新编程
AUTO	当前正在进行编程后自动血压测量
00:00	开机时显示系统时间，如零点整
♥	测量过程闪烁显示当前的测量信号
2015-01-20 15:00	显示历史血压测量的时间
🔋	显示电池当前电量

*若因产品规格变更，测量界面显示可能稍有调整，具体以实际显示为准；

首次设置和操作

1. 安装血压管理软件：

将安装CD放入计算机光驱，打开“我的电脑”或“计算机”-----CD驱动器，双击HingMed安装程序，按照安装向导安装软件；



2. 连接监测仪至计算机，与监测仪通讯：

双击打开星脉ABP软件，用USB数据线连接计算机和动态血压监测仪



5. 开始启动动态血压监测仪。

按下“开始/停止”按钮开始监测，验证监



在本章中，我们将学习如何操作和使用



测仪的准确性和稳定性。我们将通过实验来验证监测仪的准确性和稳定性。

